



WatchPAT™ ONE - תכולת הקופסה:

1. מדריך למשתמש
2. מכשיר ה-WatchPAT™ ONE עם אצבעון (1) וחייושן זהה (2)
3. סוללה AAA (3)

* חייושן זהה לא כלול בערכת WatchPAT™ ONE E

בבקשה לקרוא את ההנחיות הבאות לפני שימוש במכשיר ה-WatchPAT™ ONE

להוריד את האפליקציה WatchPAT ONE לסמארטפון שלך (זמין בחנות האפליקציות Apple Store או בחנות Google Play).

הערה: חשוב לוודא שיש לך את מספר ה-PIN בעל ארבע הספרות כדי להפעיל את המכשיר. להסיר בגדים הדוקים, טבעות, שעונים ותכשיטים אחרים.

- להסיר את הלק וציפורניים מלאכותיות מהאצבע שתכנס לחייושן ולוודא שהציפורן קצוצה קצר.
- יש לענווד את המכשיר על היד הלא דומיננטית, וניתן לחבר את חייושן האצבע לכל אצבע, למעט האגודל.

הערה: יתכן שתידרש השגחת מבוגר על מנת לתפעל את המכשיר.

הפעלת המכשיר:

עם סיום הבדיקה:

1. ללחוץ על מקש **END RECORDING** באפליקציה WatchPAT ONE ולפעול לפי ההוראות.
2. אם האפליקציה נסגרת, יש לפתוח אותה, לוודא שהטלפון מחובר לאינטרנט ולהמתין להודעת "תודה" **Thank you**.

הערה: רק כאשר רואים הודעת "תודה" **Thank you** המוצגת באפליקציה, הבדיקה הושלמה ונשלחה לרופא השינה שלך.

הכנות להתחלת הבדיקה:

- נא לכבות את כל המכשירים המשדרים בחדר, כמו שעונים חכמים, טלפונים חכמים אחרים ואוזניות, מכיוון שזה עלול להפריע לבדיקה.

- לפתוח את אפליקציית WatchPAT ONE בטלפון הנייד שלך.

- לעקוב אחר ההוראות באפליקציה אשר ידריכו אותך בשלבי הפעלת הבדיקה.

הערה: למכשיר הסלולר שלך חייבת להיות גישה לאינטרנט בזמן הכנת מכשיר ה-WatchPAT ONE לבדיקה.

REF DM2192474 - Ed.1

וידאו הוראות למשתמש



הערות חשובות:

- טמפרטורות אחסון ותפעול בין 0°C ל- 40°C.
- לא לנסות לחבר או לנתק שום חלק מהמכשיר.
- לא לנסות להכניס אובייקט דר כלשהו למכשיר.
- במקרה של בעיה לא לנסות בשום פנים אופן לתקן לבד.



איתמר מדיקל בע"מ

רח' חלמיש 9, תד. 3579
את. קיסריה, 3088900
טל. 04-6275598, פקס. 04-6177000
שירות לקוחות: 04-6177000 - שלוחה 1

EC REP Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

נתונים טכניים וסימונים

לשימוש חד פעמי, אין להשתמש שוב

טמפרטורה 0°C - 40°C

לעין בהוראות השימוש

מתח פעולת סוללה 1.5V DC

הגנה מפני כניסה בלתי מורשית IP22

חלק מיושם מסוג BF

יצרן מיכשור רפואי

מספר קטלוגי REF

מספר סידורי SN

תאריך ייצור

תאריך תפוגה

לטפל בזהירות - שביר

שמור יבש

itamar
medical

www.itamar-medical.com